



Skladiščenje

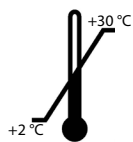

od **+2 do +30 °C** Test DrugWipe skladiščite izključno v tem temperaturnem območju.

Nepravilni pogoji skladiščenja, kot so visoke temperature ali zmrzal, poškodujejo test.

Uporaba

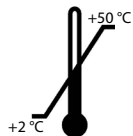

od **+2 do +50 °C** DrugWipe uporabljajte v tem temperaturnem območju.

Pri uporabi v dežju ali snegu zaščitite test DrugWipe 6 S pred vlago.

Uporabljene in pretekle teste odvrzite med preostale odpadke. Upoštevajte lokalne predpise o ravnanju z odpadki.

Nadzor kakovosti


DrugWipe 6 S vsebuje integrirano kontrolno črto (CL). Kontrolna črta prikazuje funkcionalnost in pravilno izvedbo testa.

Upoštevajte dodatne predpise, ki veljajo za nadzor kakovosti v vaši ustanovi oz. vašem podjetju.

Navzkrižne reakcije

Snovi, ki v testu DrugWipe 6 S navzkrižno reagirajo, smo analizirali v našem laboratoriju. Na zahtevo vas bomo obvestili o morebitnih navzkrižnih reakcijah.

Drugi izdelki DrugWipe

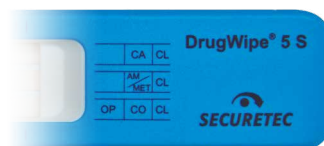

Slina



Površine



Površine,
znoj,
slina

Za odkrivanje konoplje, benzodiazepinov, amfetaminov/metamfetaminov/ekstazija, ketamina, opiatov in kokaina.



Navodila za uporabo testa DrugWipe® 6 S

Test sline za odkrivanje

- konoplje
- benzodiazepinov
- amfetaminov/metamfetaminov
- opiatov
- kokaina

Št. izd.: S 605 G

Video navodila:



Securetec Detektions-Systeme AG · Lilienthalstraße 7 · 85579 Neubiberg · Nemčija

T +49 89 203080-1651 · F +49 89 203080-1652

info@securetec.net · www.securetec.net

© 2025 Securetec Detektions-Systeme AG · 70236-SL-v02-2025-06-04

Predvidena uporaba

Test DrugWipe 6 S je namenjen kvalitativnemu odkrivanju drog v človeški slini s strani usposobljenih strokovnih uporabnikov.

Test odkrije konopljo, opiate, kokain, benzodiazepine, amfetamine oz. metamfetamine (vključno z MDMA/ekstazijem). Merilni postopek daje predhodni rezultat (presejalni postopek). Potrditev je potrebna, zlasti če so testi pozitivni. Prednostne metode širokega spektra so tekočinska ali plinska kromatografija z masno spektrometrijo (LC/MS, GC/MS).

Načelo testa

DrugWipe 6 S je imunološki hitri test. Otiralka vzorec prenese na testni trak, na katerem so protitelesa, specifična za droge. Če so v vzorcu prisotne droge, se te vežejo na protitelesa.

Test se začne izvajati takoj, ko se integrirana steklena ampula zdrobi in se tekočina sprosti. S pomočjo tekočine se vezane droge pomaknejo na testno črto. Rdečo testno črto se vizualno oceni.

Vsebina paketa







1 test slin DrugWipe 6 S

1 vrečka s sušilnim sredstvom

Pred izvedbo testa je treba upoštevati

1. DrugWipe 6 S se lahko uporabi samo enkrat.
2. Če je rok uporabnosti prekoračen, test zavrzite.
3. Izogibajte se temperaturam nad +50 °C. Možne so poškodbe testa.
4. Če je embalaža poškodovana ali v notranjosti vlažna ali če je kontrolna črta že obarvana rdeče, test zavrzite.
5. Embalažo odprite šele tik pred uporabo.
6. Slina je potencialno nalezljiva. Priporočamo, da nosite rokavice za enkratno uporabo, da preprečite stik s slino.

Izvedba testa

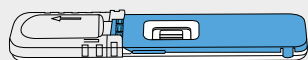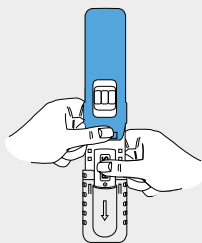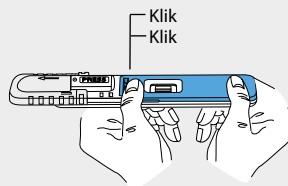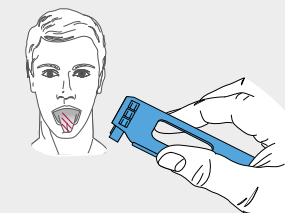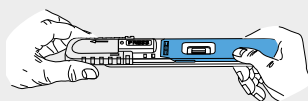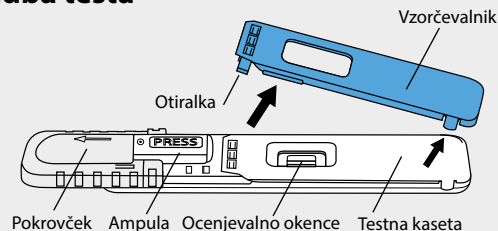

1. Pokrovček potisnite v smeri puščice, da se beseda **PRESS** prikaže v celoti.

2. Dvignite modri vzorcevalnik z bele testne kasete.
Ne dotikajte se blazinice za vzorčenje.

3. Testirano osebo prosite, naj trikrat krožno premakne jezik v ustih. Nato z otiralko obrišite slino z jezika ali notranjosti lica.

Sprememba barve blazinic za vzorčenje iz rdeče v rumeno potrjuje uspešen odvzem vzorca.

4. Vzorcevalnik postavite nazaj na testno kaseto.
Vzorcevalnik se mora slišno zaskočiti z dvojnimi klikom.

5. Testno kaseto držite z ampulo navzdol. **S palcem pritisnite enkrat na sredini in vodoravno močno pritisnite na PRESS**, da se ampula zlomi. Testno kaseto **držite, kot je prikazano, nadaljnjih 10 sekund.**

6. Test položite na vodoravno površino in ga ne premikajte. Test ocenite po 5 minutah.

Ocenjevanje testa

- Pri močno pozitivnih vzorcih je možno, da je viden rezultat na voljo že po 3 minutah.
- Test lahko ocenite po 5 minutah.
- Rezultat ostane veljaven 180 minut po koncu testa.
- Test je pozitiven tudi, če so testne črte le šibko ali nepopolno obarvane.
- Test ocenite z zadostno osvetlitvijo, npr. z žepno svetilko.

V ocenjevalnem oknu testna črta za vsak testni trak prikazuje 1 oz. 2 skupini drog in kontrolo. Ustrezajo naslednjim kraticam:

BZO	benzodiazepini
CA	konoplja (THC/marihuana/hašiš)
AM	amfetamini
MET	metamfetamin (MDMA/ekstazi)
CO	kokain (Crack)
OP	opiat (heroin/morfij)
CL	kontrolna črta

CL	CL	CL
BZO	AM/ MET	CO
CA		OP

Negativni rezultat = ni uživanja drog

Test je veljaven, ko se vse kontrolne črte obarvajo rdeče. Test je negativen na droge, pri katerih nobena testna črta ne postane rdeča.

CL	CL	CL
BZO	AM/ MET	CO
CA		OP

Pozitiven rezultat = uživanje drog

Test je veljaven, ko se vse kontrolne črte obarvajo rdeče. Test je pozitiven na droge, pri katerih se testna črta obarva rdeče.

CL	CL	CL
BZO	AM/ MET	CO
CA		OP

Neveljaven rezultat

Test je neveljaven, če se ena ali več kontrolnih črt ne obarva rdeče. Analizo ponovite z novim testom DrugWipe 6 S.