



Navodila za uporabo zbiralnika sline Statsure Diagnostic Systems Inc.

Zahtevana pripomočka:

- a) zbiralnik sline z indikatorjem ustreznosti prostornine,
- b) transportna epruveta z zaskočnim pokrovom. Epruveta vsebuje 3 ml pufra z neazidnim konzervansom

NAVODILA

Opozorilo: puferska tekočina iz transportne epruvete ni namenjena oralni uporabi.

- 1) Pripomočka ne uporabljajte po preteku roka uporabnosti, ki je natisnjen na embalaži.
- 2) Zapišite podatke o pacientu in datum odvzema na etiketo epruvete.
- 3) Izvlecite zbiralnik sline iz vrečke.
- 4) Postavite zbiralnik sline pod jezik. Zaprite usta.
- 5) Zbiralnik sline naj ostane pod jezikom, dokler indikator ne postane popolnoma moder. Modra barva pomeni, da je zbiralnik nasičen z 1 ml sline. Čas zbiranja lahko traja od 2 do 10 minut. Če indikator v 15 minutah ni postal moder, je treba blazinico odstraniti iz ust in jo zavreči. Ponovno odvzemanje vzorca sline z novim zbiralnikom se lahko začne takoj po akumulaciji sline v ustih. Zbiralnik postavite v enak položaj kot v prvem poskusu.
- 6) Odprite usta in dvignite jezik. Odstranite zbiralnik iz ust.
- 7) Odstranite pokrovček iz transportne epruvete. Nasičeni zbiralnik sline vstavite v epruveto.
Zbiralnika sline ne dajajte v usta, potem ko je bil v puferski tekočini.
- 8) Previdno namestite pokrovček na vrh držala zbiralnika v epruveti. **S SILO POTISNITE KAPICO NAVZDOL, DOKLER SE "ZASKOČI" S KLIKOM.**
- 9) Nasičen zbiralnik zmešajte s pufrom z nežnim stresanjem epruvete.
- 10) Vzorec sline čim prej odpremite v laboratorij na testiranje. Prenesite zbiralnik v laboratorij prek kurirske službe v laboratoriju ali kurirske službe tretje osebe v standardni embalaži, ki omogoča varen transport vzorca pri sobni temperaturi.

Shranjevanje: neuporabljen zbiralnik sline hranite pri sobni temperaturi (18° - 25° C) in se izogibajte izpostavljanju sončni svetlobi.